

LES SERINGUES BD PosiFlush™ XS, 10 mL

Sont utilisées **exclusivement pour le rinçage** des cathéters vasculaires

Les seringues de Sodium chlorure PosiFlush XS 0,9% sont en emballages individuels stériles, bien identifiées.




Utilisation lors de la mise en place d'un cathéter.

- Pour pratiquer le reflux veineux.
- Pour vérifier la perméabilité du cathéter.
- Pour rincer après administration d'un médicament ou d'une nutrition.
- Après prélèvement ou transfusion de sang.
- Lors de l'utilisation discontinuée des VVP, Picc-Line et DAVI.

Toujours pratiquer le rinçage en mode pulsé (au moins 3 pressions)

Mode d'emploi

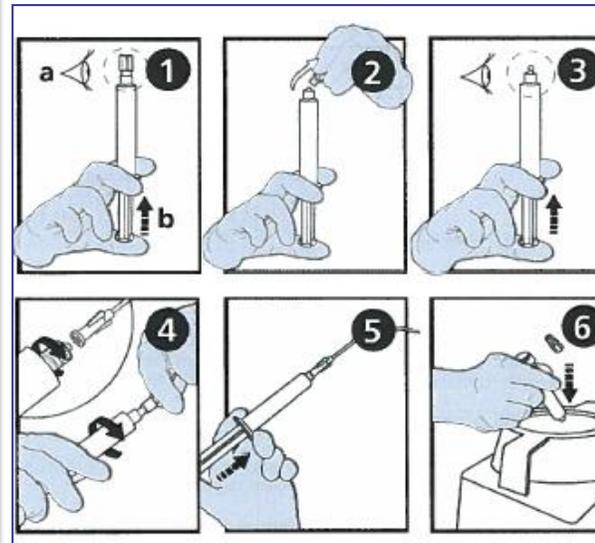

BD PosiFlush™ XS n'est pas destiné à la préparation de médicaments ou à la dilution de substances sèches.

1. a) Assurez vous que le capuchon soit en place
b) Sans enlever le capuchon, enfoncez légèrement le piston pour le débloquer
2. Dévissez le capuchon de la seringue
3. Enfoncez le piston pour chasser l'air de la seringue
4. Connectez la seringue de rinçage à l'embout luer lock de l'accès vasculaire
5. Administrez le volume de rinçage nécessaire. Ne pas appliquer de force excessive si vous ressentez de la résistance
6. Éliminer la seringue usagée selon les règles en vigueur dans l'institution

Pendant toutes les opérations, éviter les contaminations par contact : embout seringue et embout cathéter